

### ÉTAPE 1

#### OBJECTIFS

- TRAITEMENT DE LA SENSIBILITÉ DENTAIRE
- AMÉLIORATION DE LA BLANCHEUR ET DE LA BRILLANCE DES DENTS
- AMÉLIORATION DE VOTRE SANTÉ BUCCODENTAIRE

#### VOTRE OUTIL

Dentifrice X-PUR Remin

- Hydroxyapatite nano médicale 10 % (<mHAP>) : pour traiter la sensibilité dentaire, améliorer la blancheur et la brillance de vos dents, éliminer les taches et améliorer votre santé buccodentaire.
- Xylitol 10 % : goût rafraîchissant
- Sans laurylsulfate de sodium et triclosan
- Saveur douce

#### INSTRUCTIONS

- 7 jours avant votre traitement de blanchiment (ou durant la production de vos gouttières de blanchiment personnalisées fournies par votre équipe dentaire).
  - Utilisez comme dentifrice régulier 2 fois par jour (matin et soir) avant, pendant et après votre traitement.
1. Placez environ 1 à 1,5 cm de X-PUR Remin sur une brosse à dents ultra douce et brossez méticuleusement pendant 3 minutes.
  2. Expectorez. Pour de meilleurs résultats, ne pas manger, boire ou se rincer pendant les 30 minutes suivant le brossage.



### ÉTAPE 2

#### OBJECTIF

- ACTION BLANCHISSANTE ULTRA-RAPIDE

#### VOTRE OUTIL

- 2 seringues violettes (1,2 ml chacune)
- Peroxyde d'hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

#### INSTRUCTIONS

Portez vos gouttières 1 fois par jour durant 4 jours consécutifs ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus de gel.

**Pour une action blanchissante encore plus accélérée**  
Portez vos gouttières 2 fois par jour en espaçant les applications d'un minimum de 12 heures (en utilisant du nouveau gel pour chaque utilisation).

1. À l'aide d'une seringue **violette**, déposez une petite quantité de gel\* sur la partie buccale (face aux dents) de vos gouttières. Chaque seringue **violette** est calibrée et chaque ligne représente approximativement une application.  
\* Exemple de la quantité de gel:
2. Portez vos gouttières pendant 30 à 60 minutes.
3. Rincez vos dents ainsi que vos gouttières avec de l'eau immédiatement après cette étape.



### ÉTAPE 3

#### OBJECTIF

- BLANCHIMENT ÉCLATANT ET STABLE

#### VOTRE OUTIL

- 4 seringues argentées (3 ml chacune)
- Peroxyde de carbamide (CH<sub>3</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)

#### INSTRUCTIONS

Portez vos gouttières 1 fois par jour durant 12 jours consécutifs ou jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.

1. À l'aide d'une seringue **argentée**, déposez une petite quantité de gel\* sur la partie buccale (face aux dents) de vos gouttières. Chaque seringue **argentée** est calibrée et chaque ligne représente approximativement une application.  
\* Exemple de la quantité de gel:

#### 2. Portez vos gouttières pendant 60 à 90 minutes

**Pour une action blanchissante encore plus accélérée**  
Portez vos gouttières durant la nuit.

3. Rincez vos dents ainsi que vos gouttières avec de l'eau immédiatement après cette étape.
4. Si vous n'êtes pas satisfait de vos résultats de blanchiment, répétez l'étape 3 et contactez votre équipe dentaire pour obtenir de l'aide supplémentaire.
5. Réfrigérez les quantités restantes de vos seringues pour des retouches futures pendant 12 mois.

#### Le système de blanchiment à la maison X-PUR

Pro-Synergix Premium est sécuritaire et efficace lorsqu'il est utilisé selon ce mode d'emploi. Votre traitement doit également être supervisé par votre équipe dentaire à l'aide d'un diagnostic initial, d'un nettoyage professionnel, d'une explication du mode d'emploi et d'un examen de suivi.

Pour plus d'informations, contactez notre service à la clientèle au 1 888 442.7070.



CRÉER LA SYNERGIE

www.x-pur.com

#### CONSEILS D'UTILISATION

- La stabilité de votre blanchiment dépendra de votre style de vie. Il est possible de refaire périodiquement un traitement de blanchiment (fourni par votre dentiste).
- Réduisez la consommation de café, de thé, de vin rouge, de boissons gazeuses et de tabac, durant votre traitement, car cela contribue à la formation de taches.
- L'émail, la dentine et les restaurations dentaires ne seront pas affectés par X-PUR Pro-Synergix. Attendez entre 7 à 10 jours avant d'effectuer de nouvelles restaurations dentaires.

#### PRÉCAUTIONS

- N'effectuez pas un traitement de blanchiment si vous êtes enceinte ou allaitez.
- Gardez le gel de blanchiment hors de la portée des enfants.
- N'avalez pas le gel de blanchiment.
- Conservez les seringues dans un endroit frais et sec ou réfrigérez-les. Ne pas congeler.
- N'exposez pas les seringues à la chaleur ou la lumière.

Profitez de votre sourire éclatant!